



## PAȘII DE URMAT ÎN VEDEREA TESTĂRII ELEVILOR

1. se scoate dispozitivul de testare din ambalajul de aluminiu sigilat și se va folosi cât de curând posibil;

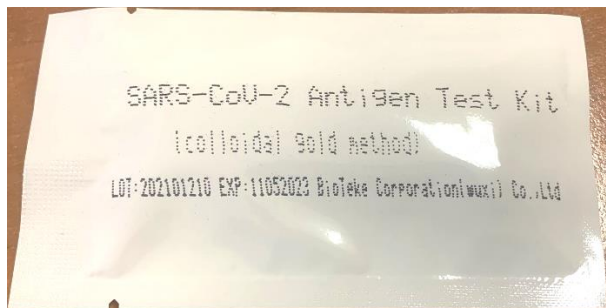

2. se așază dispozitivul de testare pe o suprafață plană și curată;

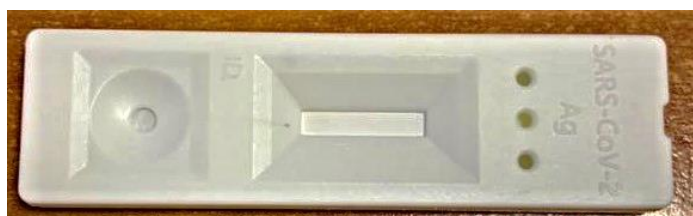

3. se scoate un tub de extracție și o sticlă de soluție.

Se scoate capacul și se adaugă soluția în tubul de extracție;



4. se scuipe salivă în recipientul pentru colectarea salivei;




5. se extrag 4 picături de salivă cu o pipetă



și se transferă în tubul de extracție;



**6.** se îndoaie și se aruncă recipientul de colectare a probei într-o pungă de plastic ca deșeu medical;

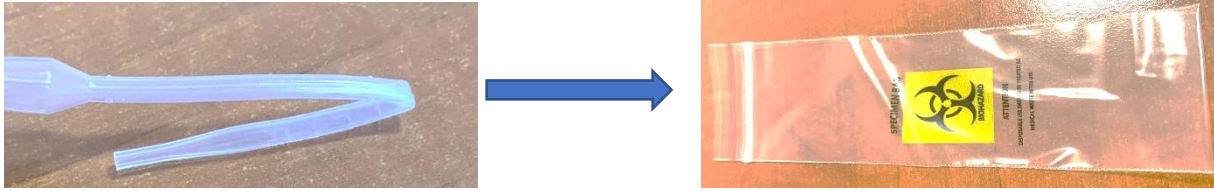

**7.** se închide tubul de extracție cu capacul și se agită ușor, vertical, timp de aproximativ 5 secunde pentru a permite salivei să se amestece bine cu soluția;



**8.** se transferă 3 picături de probă în spațiul de probă al dispozitivului de testare (casetă);



**9.** se citește rezultatul după 10-15 minute;

**10.** se interpretează rezultatul conform instrucțiunilor de utilizare:

- pozitiv: apar două linii. O linie colorată apare în zona-martor (C) și o altă linie colorată apare la zona de test (T), indiferent de intensitatea liniei de testare;
- negativ: o linie colorată apare în zona-martor (C) și nu apare nicio linie în zona de test (T);
- neconcludent: linia de control nu apare. Volumul specimenului insuficient sau tehnicile incorecte din punct de vedere procedural constituie motivele cele mai probabile ale rezultatelor nule. Se revizuieste procedura și se repetă testul utilizând o nouă casetă de testare.